

# Kurzgebrauchsanweisung

**Betriebsanzeige**  
Anzeige für Betrieb, Warnungen, Fehler

**Ausgusspülung**  
(für separaten Ausguss) Option  
Waschkammerspülung

**Anzeige**  
für Warnung oder Fehler  
**Haustechniker verständigen**  
**Übernahmetaste**  
quittiert Fehler / schaltet Signal ab

**Infrarotschnittstelle**

**Kurzprogramm ①**

**Normalprogramm ②**

**Intensivprogramm ③**

**Cursorfeld**  
Tasten ▲ ▼ für Anzahl Programmabläufe,  
Tasten ◀ ▶ siehe Gebrauchsanweisung




1. Waschkammertür durch Lichtsensor oder Fußtaster öffnen.



2. Reinigungsgut in der vorgesehenen Position im Gefäßehalter einsetzen.



3. Reinigungsprogramm entsprechend der Verschmutzung wählen. Die Programmtaste drücken. Tür schließt und das Programm startet mit dem voreingestellten A<sub>0</sub>-Wert automatisch.

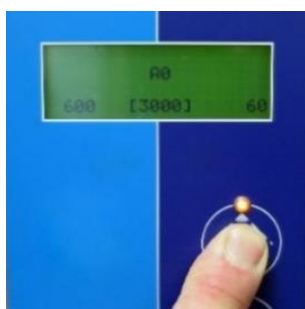

#### 4. ALTERNATIV

Programmtaste gedrückt halten bis der geforderte A<sub>0</sub>-Wert mittig in der [ ] angezeigt wird. Dann die Programmtaste sofort loslassen. Tür schließt und das Programm startet automatisch.



### **Vorsicht**

#### **Einklemmgefahr**

Türbewegung kann Finger, Hand und Arm quetschen.

- Kein Eingreifen bei Türbewegung.
- Haustechniker oder MEIKO Service zum Entfernen von Türblockade rufen.